



Geavanceerd gebruik

PROPRIO FOOT® 

Volgorde trapmodus	Ingedrukt houden	In-drukken	Geluid
Trapmodus 6°			3x PIEP
Trapmodus UIT	↓ HERHALEN		1x PIEP
Trapmodus 4°	↓ HERHALEN		2x PIEP

PROPRIO FOOT® standaardinstellingen: Trapmodus 4°

Volgorde relaxmodus	Ingedrukt houden	In-drukken	Geluid
Alleen modus 'stoel verlaten'			3x PIEP
Relaxmodus UIT	↓ HERHALEN		1x PIEP
Relaxmodus AAN	↓ HERHALEN		2x PIEP

PROPRIO FOOT® standaardinstellingen: Relaxmodus UIT

PROBLEEMOPLOSSING:

Draag geen laarzen of schoenen die de enkel bedekken! De PROPRIO FOOT® zal niet correct werken als de enkelbeweging op enige manier gehinderd wordt.













Er zal een alarm en trilling optreden als de enkel wordt gehinderd. Reset de enkel door deze UIT en vervolgens weer AAN te zetten.



Life Without Limitations®

Geavanceerd gebruik

PROPRIO FOOT® 

Functie	Ingedrukt houden	In-drukken	PIEP
Voeding AAN/UIT	 		2xPIEP = AAN 3xPIEP = UIT
Hakhoogte instellen			1x Start 1x Bewegen 1x Compleet
Ga naar neutraal/relax			1x Relax
Handmatige beweging van de motor			n.v.t.
Geluid AAN/UIT			1x AAN
KALIBRATIE AAN/UIT			1x AAN/UIT



OPMERKING:

Het toetsenbord wordt uitgeschakeld na 60 seconden inactief te zijn geweest.
Zet de enkel weer AAN om het toetsenbord weer in te schakelen.



Life Without Limitations®